

# 非接触式体表面温度計

(はかっちゃう君)



WTW-IPWS1470TG


取扱説明書

塚本無線 サポートページ

※ 困ったときはこちらをご参照ください ▶



# 1 各部の名称

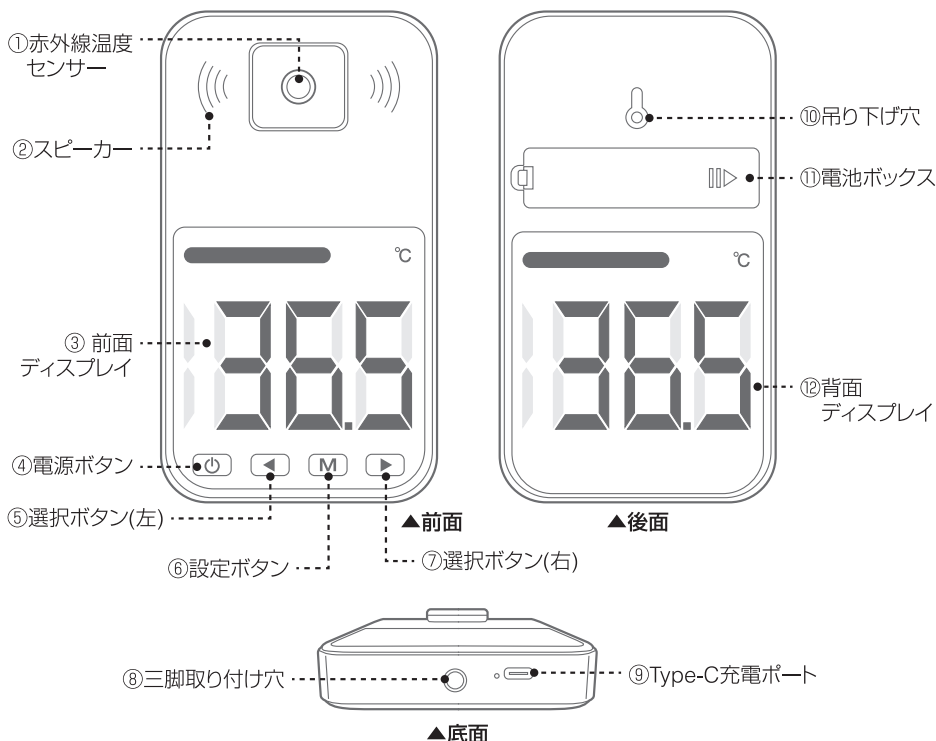

# 2 機器の設置

- 三脚等に取り付ける場合… 本体下部の三脚取付穴をご使用ください。
- 壁面等に設置する場合… 付属のビス等を使用して吊り下げてください。

## ⚠ 設置時のご注意

- 太陽や照明器具・暖房器具等の熱を発するものがある方向に向けないでください。(計測の妨げとなるおそれがあります)
- 被測定者の顔の高さに合わせて設置してください

# 3 使用前の準備

- 機器に付属の USB ケーブルと電源アダプターを接続し、24 時間程度充電を行って下さい。  
※長時間で使用時は、付属の USB ケーブルと電源アダプターで電源供給を行って下さい。
- 測定開始の 10 ～ 30 分以上前に電源を ON にし、環境の温度に適應させてから測定してください。

- 4 使用方法**
- 温度センサー部から約 1m ～ 3m までの範囲で、検温が可能です。
  - 判定値の初期値は 37.3℃で、設定で変更可能です。

温度表示	音声	アラームライト
Hi	サイレン + 【体温が高い】	赤
判定値～42.0℃	サイレン + 【体温が高い】	赤
34.0℃～判定値	ピンポン + 【通常の体温】	緑
34.0℃未満	(計測されません)	


★距離1m未満では、測定値が高めに出ることがあります。

## 5 ボタン操作

 ④ 電源ボタン 短く押しで電源 ON、長押しで電源 OFF

(A) 短く押しと測定履歴が表示されます。(降順) (過去の履歴)

※測定履歴は直近の 50 回分を保持

 ⑤ 選択ボタン 左



(B) 長押しでモードの切り替え



(bod = 体温モード・Cou = カウントモード)

 ⑥ 設定ボタン

短く押しと設定変更モードになります。項目設定中再度押しすることで次の項目に移ります。

各機能は、  ボタンで設定値の変更を行ってください

1 度目 (1) 言語 【 】ボタンで L06 で日本語を選択

2 度目 (2) 温度単位 ℃ (摂氏) を選択ください


3 度目 (3) 音量 音声ボリュームが変更できます。  
注意) 動作音は消すことができません

4 度目 (4) モード 体温測定は、【bod】で使用ください。

5 度目 (5) 高温判定値 体温異常を検知する温度を設定できます

6 度目 (6) 屋内・屋外 室内・室外で使用の際、選択ください

 ④ 設定の決定 設定が確定しましたら電源ボタンを押し決定してください

 ⑦ 選択ボタン 右 (A) 短く押しと測定履歴が表示されます。(昇順)

(B) 長押しで、温度単位切り替え

設定項目	設定値
(1) 言語	L00: 音声なし (ピンポン・サイレンのみ) L01: 日本語音声あり
(2) 温度単位	C … 摂氏 (°C) F … 華氏 (°F)
(3) 音量	Vo0 … 無音 ～ Vo9 最大値
(4) モード	bod … 体温モード (温度を表示) Cou … 計数モード (横切った回数を表示)
(5) 高温判定値	36.0 ～ 38.0 の範囲で設定可能
(6) 屋内・屋外	h I … 屋内モード h O … 屋外モード ※ 高温の屋外でご使用の際は、屋外モードに切り替えてください。

## おかしいと思ったら

- ① 000 や 001 のように数字が表示されている場合、Cou モードになっておりますので、【◀】を長押しで、bod モードに戻してください。
- ② 異常な数字が表示された時、温度単位が【F】になっていませんか



## 保証書

本書は本書記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。

お客様	ご住所	〒 TEL		機種名	製造No.
	お名前	ふりがな		<b>WTW-IPWS1470TG</b>	
保証期間	お買い上げ日		お買い上げ販売店	住所	〒
	ヶ月	年 月 日から 年 月 日まで		TEL	
				店名	

販売店様へのお願い: 本保証書に貴店の記入認印、及びお買い上げ日の記入のないものは無効ですので、必ずご記入ください。

### 保証規定

この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社にお問い合わせ下さい。

1. 取扱説明書等の注意に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、保証期限内無償修理をさせていただきます。
2. 保証期間内においても、次のような場合には有償修理となります。
  - (イ) 本保証書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、及び販売店名の表示のないもの。
  - (ハ) お買い上げ後の取付場所の移動・輸送・事故・落下等による故障または損傷。
  - (ニ) 火災・地震・落雷・水害・塩害・公害その他の天災地変及び異常電圧・指定外の使用電源などによる故障または損傷
  - (ホ) ご使用上の誤り、不当な修理・調整・改造による故障及びそれらが原因により生じた故障、または故障の原因が本製品以外の機器等にある場合。
  - (ヘ) 本来の目的以外にご使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 製品番号の改変及び取り外した製品。
  - (チ) トランジスター・ケーブル等消耗品に類するもの。
  - (リ) 他の要因・取付不備・電波障害・設備場所などにより正常に動作しない場合。
3. 修理を依頼される場合には、お買い上げの販売店または弊社サービス係へ保証書を添えてご持参下さい。やむを得ず郵送される場合は、送料をご負担下さい。
4. 本保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
5. この保証書は日本国内のみについて有効です。 This warranty is valid only in Japan
6. 予告なしに当機種のモデルチェンジ、改良などを行うことがあります。お買い上げの製品に関しましては改良などの申し受けを致しません。

修理実施年月日	故障状況	修理実内容	担当者

株式会社 塚本無線

〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1 丁目16-21  
TEL 050-1752-8000(代表) FAX 059-387-6999