


WTW-IPWS1458TG2 “たいおん君” 取扱説明書

各部の名称

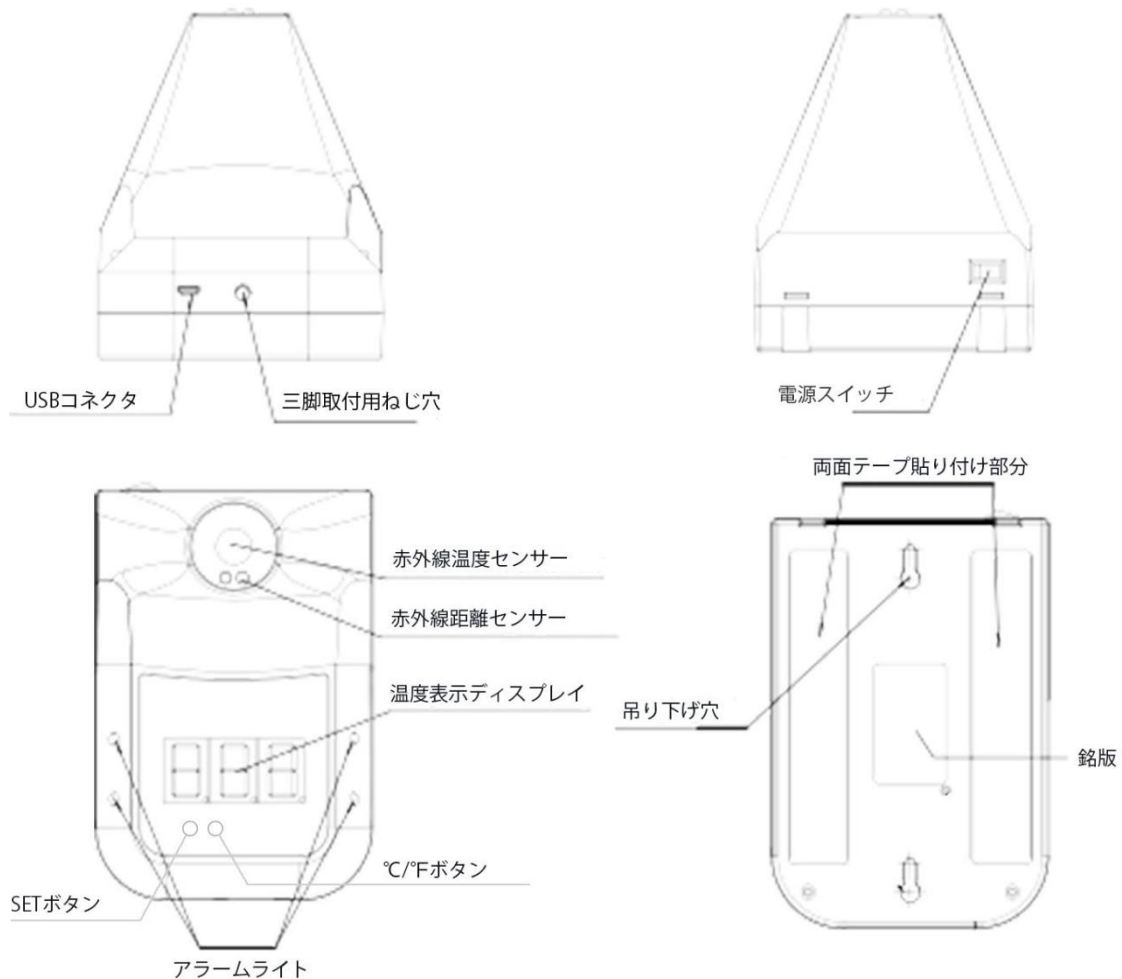

機器の設置

- 三脚等に取り付ける場合 … 本体下部の三脚取付穴をご使用ください。
- 壁面等に設置する場合 … 付属の両面テープを使用して貼り付けるか、付属のビスを使用して吊り下げてください。

使用前の準備

- 機器に付属の USB ケーブルと電源アダプターを接続し、24 時間程度充電をおこなって下さい。充電した状態で約 5000 回測定可能です。
※ 測定回数が少ない場合でも、3～5 日に 1 回程度は再充電をおこなって下さい。
- 機器は、周囲の温度が 20°C～30°C の環境で使用してください。温度の低い環境・高い環境では、正常に測定できないことがあります。
- 測定開始の 30 分以上前に機器を設置し電源を ON にし、環境の温度に適応させてから測定を開始してください。

使用方法

- 温度センサー部から 5～10cm の範囲に測定者の額を近づけてください。
約 0.5 秒で温度を測定して表示します。

温度表示	音声	アラームライト
Hi	「体温異常 もう一度チェックしてください」	赤
37.5～42.9°C	「体温異常 もう一度チェックしてください」	赤
35.5～37.4°C	「体温正常」に続いて温度読み上げ	緑
32.0～35.4°C	アラーム音 1 回	緑
Lo	アラーム音 3 回	赤

ボタン操作

- SET ボタン … 音声の言語を切り替えることができます。
- SET ボタン 3 秒長押し … ボイス OFF （SET ボタンを短く押すとボイス ON に復帰）
ボイス OFF では、音声案内の代わりにアラーム音が鳴ります（無音にはなりません）
- °C/°F ボタン … 温度表示単位（摂氏°C/華氏°F）を切り替えることができます。
- °C/°F ボタン 3 秒長押し … 測定モードを切り替えることができます。

通常は体温測定モードでご使用ください。

ディスプレイ表示	測定モード
Sur	表面温度測定モード
Cou	カウンターモード
bod	体温測定モード